




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
## Produktinformationsblatt

### Mehrfach-Kalt/Warmkompresse

**Kalt Anwendung:** Die Kompresse wird für 2 Stunden in das Gefrierfach oder die Tiefkühltruhe gelegt. Vor dem Auflegen auf die Haut, sollte die Kompresse in ein Tuch eingewickelt werden.

**Warm Anwendung:** Die Kompresse wird für ca. 5 Minuten in max. 80° Grad heissem Wasser erwärmt. Alternativ kann die Kompresse auch in der Mikrowelle bei 500 Watt erhitzt werden. Hierbei sollte die Kompresse nicht länger als 2 Minuten in der Mikrowelle erhitzt werden. Vor dem Auflegen auf die Haut, sollte die Kompresse in ein Tuch eingewickelt werden.

**Artikelnummer: D6117**

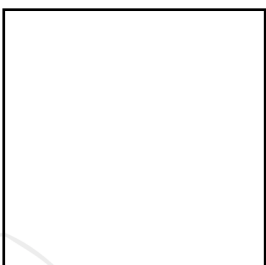

## Zubehör zum Artikel

- D6115 - Mehrfach-Kalt/Warmkompresse - 16 x 26 cm
- D6118 - Mehrfach-Kalt/Warmkompresse - 8 x 13 cm
- D6119 - Mehrfach-Kalt/Warmkompresse - alle Grössen
- D6124 - Mehrfach-Kalt/Warmkompresse - 13 x 14 cm
- D6125 - Mehrfach-Kalt/Warmkompresse - 12 x 29 cm



D6115



D6118



D6119



D6124



D6125